

Desinfektion LifeClean

Desinfektionsmedel



Praktisk data

Egenskaper

För rengöring och desinfektion av ytor. Effektiv mot endosporer t.ex. *Clostridium difficile*, virus och multiresistenta bakterier.

Användning

Avlägsna synlig smuts och tidigare applicerade kemikalier från tänkt appliceringsyta. Applicera generöst med Desinfektion LifeClean på en ren trasa och torka ytan. Verkningsstid inom två minuter. Efter desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet om materialkompatibilitet med desinfektionslösningen då vissa metallytor kan vara känsliga för lågt pH-värde. Regelbunden avsköljning av ytor med vatten rekommenderas.

Stäng öppnad flaska och märk med öppningsdag. Öppnad flaska hållbar 4 veckor från öppningsdag.



Teknisk data

Innehåll

Klordioxid och tensider.

pH-värde

pH ca 2.

Varningsmärkning

Användning av LifeClean Desinfektion anses inte som hälso- eller miljöfarligt enligt gällande riktlinjer.

Tillverkningsdatum

Lagringstid 12 månader i kylskåp och originalförpackning

Lagringstid 9 månader i rumstemperatur och originalförpackning

Öppnad flaska är hållbar i 4 veckor efter öppningsdag.

Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Förpackning och artikel nr

500 ml	Art.nr 68303
1 liter	Art.nr 68301
5 liter	Art.nr 68300