

Överlägsen desinfektion

För icke-invasiva medicintekniska produkter

Utvärderad som high-level desinfektion




Miljösäker
lösning


Överlägsen
effekt


Säkrare
arbetsmiljö

Innehåller
inte alkohol
eller fritt klor

Dokumenterad
effekt

Virus / multiresisten-
ta bakterier / jäst
och mögel /

Avdödar
Corona
inom 30
sekunder!

Bevisad effekt mot bland annat:

Sporer

- Clostridium difficile
- Bacillus subtilis, Bacillus cereus

Virus

- Poliovirus
- Adenovirus
- Murine norovirus (MNV), t.ex. **vinterkräksjuka** (Calicivirus)
- IPN Virus (Infectious Pancreatic Necrosis), virusinfektion hos laxfisk
- Avian influenza virus (H10N7)
- Porcine parvovirus (PPV)
- **Coronavirus**

Svamp och jäst

- Candida albicans
- Aspergillus brasiliensis (niger), t.ex. **svartmögel**

För mer information se Microbiological Efficacy Summary.

Bakterier

- Enterococcus hirae
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli (E-coli)
- Campylobacter jejuni
- **Salmonella** typhimurium
- Legionella pneumophila
- Aeromonas salmonicida (Furunculosis)
- Yersinia ruckeri (Redmouth)
- Klebsiella pneumoniae (ESBL)
- Entrococcus faecium (VRE)
- Acinetobacter baumannii
- Staphylococcus aureus
- **Listeria** monocytogenes
- Streptococcus equi
- Carnobacterium piscicola (Carnobacterium maltaromaticum)

Mykobakterier

- Mycobacterium terrae
- Mycobacterium avium



Den ideala desinfektionslösningen:

Kort kontakttid

LifeClean bidrar till stora tids- och ekonomiska besparingar tack vare den korta kontakttiden på max 2-5 minuter. LifeCleans kontakttid är kortare än dess torktid och återapplicering är ej nödvändig.

Låg koncentration, men effektiv

Starkare är inte alltid bättre. Tack vare att LifeClean är effektivt även i små doser, lyckas vi förverkliga vår vision om att ta hand om människa, djur och natur.

Superior effect

Till skillnad från de flesta desinfektionsmedel har LifeClean ett maximalt avdöningsspektrum, inkl. Clostridium difficile, B. subtilis, E. coli, Salmonella, Listeria, vinterkräksjuka (Calici), Candida albicans, mögel och virus.

Användarvänlig

Ett färdigblandat medel som är enkelt att använda. Inga faropiktogram finns på grund av LifeCleans mer miljösäkra* egenskaper. Förvara i rumstemperatur.

Bevisad effektivitet

LifeClean är rutinmässigt testat i oberoende laboratorium enligt gällande EN-standarder. Våra uppfyllda EN-standarder försäkrar våra användare om ett verkligt effektivt skydd vid användning av LifeClean.

*Miljösäker lösning

Ej klassificerad som skadlig. Effektiv även i låga koncentrationer. Bryts ned till ofarliga och enkelt nedbrytbara restprodukter.

Består av
**99,6%
vatten**

Produkten

Desinfektionsmedel för icke-invasiva medicintekniska produkter..

LifeClean har 100 % desinficerings effekt och är utvärderad som high-level desinfektion. LifeCleans överlägsna effekt eliminerar multiresistenta bakterier, sporer, virus och jäst och mögel. En högeffektiv produkt är en fördel för anställda och patienter, säkerställer skydd mot VRI och en hög hygien nivå, och är ekonomiskt hållbar.

LifeClean är ett patenterat och stabilt desinfektionsmedel baserat på ClO₂. Produkten uppfyller europeiska EN-standarder och har genomgått kliniska tester av tredjeparts-institut och laboratorier.

Avsedd användning

High-level desinfektionsmedel med högt avdödningspektrum för icke-invasiva medicintekniska produkter, avsedda för rena förhållanden ("synligt rent")

Effektiv mot b.l.a.



Organism	Kontaktid Clean	Standard
✓ Sporidical	5 min	EN 17126
✓ Mycobactericidal	1 min	EN 14563
✓ Virucidal	1 min	EN 14476
✓ SARS-CoV-2	30 sec	EN 14476
✓ Fungicidal / Yeast	1 min	EN 13624
✓ Bactericidal	1 min	EN 13727

Avsedd användning

High-level desinfektionsmedel med högt avdödningspektrum för icke-invasiva medicintekniska produkter, avsedda för smutsiga förhållanden ("synbart smutsigt")

Effektiv mot b.l.a.



Organism	Kontaktid Clean	Kontaktid Dirty	Standard
✓ Sporidical	2 min	2 min	EN 17126
✓ Mycobactericidal	1 min	-	EN 14563
✓ Virucidal	1-2 min	-	EN 14476/16777
✓ SARS-CoV-2	30 sec	-	EN 14476
✓ Fungicidal / Yeast	1 min	2 min	EN 13624/14562/16615
✓ Bactericidal	1 min	2 min	EN 13727/14561/16615



Användarinstruktioner 2021-02

- 1 Endast för professionellt bruk. Följ lokala riktlinjer. Använd handskar.
- 2 PPE bör användas vid behov*
- 3 Ta bort synlig smuts
- 4 Applicera en generös mängd lösning på servett
- 5 Torka ytan mekaniskt med servett för desinfektion
- 6 Låt LifeClean verka under önskad kontaktid/applikationstid
- 7 Markera öppningsdatum på etiketten. Stäng öppnad flaska



* För mer information: Säkerhetsdatablad för LifeClean.

Clean & Green?

Desinfektionsmedel skiljer sig åt i sina hållbarhets egenskaper. Användning av LifeClean i enlighet med tillverkarens bruksanvisning minimerar de minst önskvärda egenskaperna, till förmån för de mest önskvärda egenskaperna.

LifeClean är inte klassificerad som farlig enligt EG 1272/2008 (CLP). Produkterna reagerar omedelbart, bryts ner snabbt och lämnar inga farliga biprodukter eller giftiga föreningar. Klassificerat som ofarligt avfall.

LifeCleans komponenter är lätt nedbrytbara och ackumuleras inte i naturen. LifeClean bildar inga klorerade biprodukter såsom kloraminer.

LifeClean har ca. 100 gånger lägre miljöpåverkan (CO₂e) i produktionsledet än ex. alkoholbaserade desinfektionsmedel.

Icke-toxisk: ej giftigt för människor och djur (inte klassificerat som farligt)

Inga långtidseffekter för miljön

Minimal klimatpåverkan (låg CO₂e)

Inga korttidseffekter för miljön

Lätt (biologiskt) nedbrytbara komponenter

Skada eller förorena miljön vid kassering

Giftiga/farliga biprodukter

Dödlig för människor

MEST ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER

MINST ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER

© LifeClean International AB
LC-ART0485 ver01 Oct. 2022.

LIFE  CLEAN



www.lifeclean.se/
info@lifeclean.se
+46 522 104 04

Tillverkad
i Sverige



Patented